

РЕГЛАМЕНТ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Аппарата искусственной вентиляции легких MB200 "ЗисЛайн"

Процедура	Год											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена датчика кислорода FiO2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Замена датчика кислорода VO2		x		x		x		x		x		x
*Замена расходных материалов капнографа бокового потока, метаболографа (влажнотделитель, соединитель), капнографа прямого потока (вентиляционный адаптер)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Замена пылевого фильтра	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Замена фильтра кислородного редуктора	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проверка утечек в канале подачи смеси к пациенту (смеситель газов, генератор потока, подающие трубки)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Замена аккумуляторов			x			x			x			x
*Замена датчика пульсоксиметрического		x		x		x		x		x		x
Замена ремня привода воздуходувки			x			x			x			x
Продувка от пыли и грязи датчиков потока	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
*Замена сетевого кабеля					x					x		
Замена компрессора продувки			x			x			x			x
Замена компрессора капнографа бокового потока					x					x		
Проверка допустимого уровня шума при работе генератора потока	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Очистка от грязи и пыли вентилятора охлаждения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Замена мембраны в клапане выдоха	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Сроки замены расходных материалов являются рекомендованными. Срок службы расходных материалов сильно зависит от интенсивности и аккуратности эксплуатации.