

**РЕГЛАМЕНТ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Монитора прикроватного реаниматолога и анестезиолога переносного МПР6-03-"ТРИТОН"**

Процедура	Год											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена датчика кислорода капнографа		x		x		x		x		x		x
* Замена расходных материалов капнографа бокового потока, метабологафа (влажотделитель, соединитель), капнографа прямого потока (вентиляционный адаптер)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
* Замена сетевого кабеля, кабеля содинительного для измерения ИАД.					x					x		
* Замена датчиков измерительных каналов (датчиков пульсоксиметрических, кабеля пациента, манжеты, шланга для манжеты, датчиков температуры)		x		x		x		x		x		x
Очистка от грязи и пыли вентилятора охлаждения и внутренних компонентов прибора	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Замена компрессора в модуле капнографа						x						x
Замена клапанов в модуле НИАД					x					x		
Замена компрессора в модуле НИАД					x					x		
Замена аккумулятора			x			x			x			x

* Сроки замены расходных материалов являются рекомендованными. Срок службы расходных материалов сильно зависит от интенсивности и аккуратности эксплуатации.