

РЕГЛАМЕНТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Процедура	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внешний осмотр	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проверка работы органов управления	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проверка и тренировка аккумулятора			x			x			x			x
Проверка работоспособности измерительного канала	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Монитора оценки глубины анестезии МГА-06

Процедура и технические требования

1. Внешний осмотр

Прибор не должен иметь механических повреждений и следов попадания жидкости внутрь. Оболочка сетевого шнура, не должна иметь повреждений и резких перегибов.

2. Проверка органов управления

Проверить работу кнопок управления, которые должны четко срабатывать и вызывать соответствующие действия. Если область нажатия сенсорных кнопок управления дисплея смещена относительно своего графического обозначения необходимо обратиться в сервисную службу.

3. Проверка и тренировка аккумулятора

Полностью разрядить аккумулятор. Подключить аппарат к сети (индикатор БАТАРЕЯ должен гореть зеленым цветом). Полностью зарядить аккумулятор (индикатор БАТАРЕЯ должен погаснуть). Проверить время работы прибора от полностью заряженного аккумулятора. Повторно зарядить аккумулятор.

4. Проверка работоспособности измерительного канала и датчика

- Провести внешний осмотр модуля оценки глубины анестезии.
- Подключить модуль к электронному блоку и провести проверку работоспособности измерительного канала.